




PROTOCOLO BACTERIAS



**Warning: Document only for Training use.
Does not replace the User Manual.**


PIONEERING DIAGNOSTICS

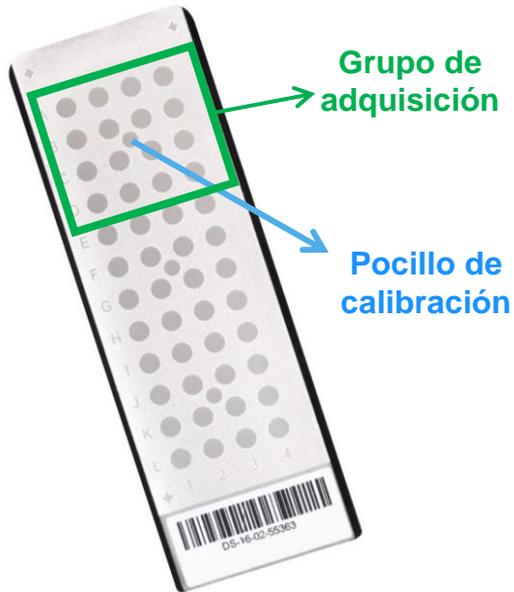

! Deposite una muestra por pocillo – capa degada



1_Recolección de la colonia

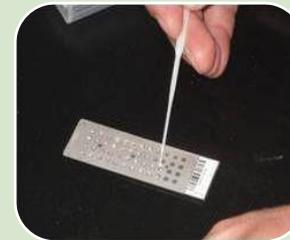

2_Depósito de la colonia en el pocillo
Con ansa de 1 μ L o VITEK® PICK ME

! La matriz debe colocarse en cada spot y debe cubrir toda la superficie

! Respete el protocolo de depósito y cambie los tips después de cada depósito de matriz



3_Depósito de la Matriz = 1 μ L CHCA

! Los slides deben almacenarse en las condiciones correctas (antes de su uso y después de la preparación de la muestra)



4_Secado para cristalización

PROTOCOLO DE BACTERIAS



1. Preparación de materiales



2. Elección de la colonia




3. Tomar la colonia




4. Depositar en pocillo. Ansa de 1 μ L



5. Agregar 1 μ L Matriz

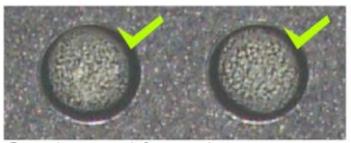

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6. Dejar secar



PIONEERING DIAGNOSTICS